



P.E.T.R. DU
PAYS DE LANGRES

Le fauteuil amphibie pour la mise à l'eau et le confort aquatique des personnes empêchées

3 TIRALOS sur les plages du Pays de Langres

Nouveau DESIGN
Nouveau flotteur
NOUVEAU LOOK

ÉCONOMIE SOLIDAIRE
FABRIQUÉ PAR L'ESAT
FABRICATION FRANÇAISE
MODÈLE DÉPOSÉ

VISITEZ NOTRE SITE WEB ! VIDÉOS TÉMOIGNAGES
www.tiralos.org

tiralos²
Le FAUTEUIL de BAINADE pour personnes à mobilité réduite



**Depuis le 1 juillet 2018 trois TIRALOS sont à disposition
du public à mobilité réduite,
deux au lac de Charmes, un au lac de la Liez**



Dimensions

Largeur	
Siège	50 cm
Largeur totale	107 cm
Hauteur	
Siège	45 cm
Dossier	90 cm
Longueur totale	
Timon plié	220 cm
Poids	31 kg
Charge maximale	130 kg
Charge minimale	25 kg
Colisage	178 x 104 x 58 - 38 kg - 1.073 m ³

Matériaux

Châssis : En aluminium et inox.
Toile : Filet tissé en nylon anallergique.
Accoudoir : Flotteur monobloc roto moulé.
Roues : 3 roues identiques basse pression, la roue avant est articulée.
Traction : Fauteuil tiré par une barre de traction équipée d'une poignée.

Pièces détachées

Disponibles **sur commande** auprès de notre service commercial ou sur notre site web www.tiralo.org

Robuste !

Le montage est simple et l'entretien facile.
Avec son châssis et son dossier en aluminium renforcé, sa qualité première est la **robustesse**.

Composé de très peu de pièces et livré déjà presque **monté**, il ne vous faudra **pas plus d'une minute** pour profiter des joies de la baignade. Un simple rinçage à l'eau claire après chaque baignade vous permettra d'en profiter pendant des années.

Ce fauteuil développé pour le littoral trouve parfaitement sa place sur les lacs, notamment par sa facilité de mise à l'eau et ses qualités de flottabilité.

Il redonne aux personnes la possibilité de se baigner, qui par leur handicap, moteur ou sensoriel, n'ont pas la capacité d'accéder à des lieux de baignade en toute autonomie.



Les TIRALO sur les plages du pays de Langres

3 TIRALO sont mis à disposition sur les plages des lacs de Charmes et de la Liez.

Vous les trouverez à côté de la chaise du surveillant de baignade qui est en poste de 14h00 à 19h30 tous les jours des mois de juillet et août. Demandez à l'utiliser au surveillant de baignade de la plage reconnaissable avec son tee-shirt et sa casquette rouge.

Usage du TIRALO

Nos TIRALO sont mis **à disposition exclusivement** aux **personnes à mobilité réduite ou handicapée qui disposent d'un accompagnateur qui ira dans l'eau avec elles.**

Le TIRALO n'est pas un objet ludique tout public, mais un fauteuil réservé pour les bains des personnes empêchées.

Le TIRALO est utilisé sous la responsabilité de son usager et du (ou des) personnes(s) qui l'accompagne(nt). **Le surveillant de baignade de la plage ne peut se substituer à l'accompagnant.** Il est en poste pour la surveillance de la baignade.

Le TIRALO s'utilise seulement dans la zone de baignade délimitée. L'accompagnant doit toujours avoir pied pour contrôler la stabilité du fauteuil de bain. Il est conseillé de ne pas s'éloigner de la rive de plus de quelques mètres. En cas d'usage non conforme ou irraisonné, le surveillant de baignade à toute autorité pour mettre un terme à l'utilisation du TIRALO.

**Le TIRALO n'est pas une embarcation mais une aide à la baignade.
Il doit être utilisé sous la responsabilité d'un accompagnant.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ✓ S'assurer que le TIRALO est opérationnel.
- ✓ Munir l'utilisateur d'un gilet de sécurité avec tête.
- ✓ Choisir la baignade par mer calme et en zone surveillée.
- ✓ L'accompagnant doit veiller à avoir lui-même pied, ne pas amener l'utilisateur dans les vagues ou dans le courant.
- ✓ Respecter les arrêtés municipaux des sites accessibles.
- ✓ Ne pas laisser une personne SEULE sur le TIRALO.
- ✓ Attention aux risques d'insolation liés à une immobilité sur la plage.
- ✓ Ne pas attacher l'utilisateur sur le TIRALO.
- ✓ Respecter les règles du bon sens : ne pas l'utiliser comme un bateau, ne pas le manoeuvrer avec des rames ou un moteur, ne pas le tracter avec un vélo ou une voiture, ne pas sauter ni plonger du fauteuil, ne pas installer plus d'un usager et surtout pas un bébé.



Contact :
Emmanuel PROBERT
03.25.84.10.04
probert@pays-langres.fr





P.E.T.R. DU

PAYS DE LANGRES

CONTACT

PETR du Pays de Langres
215 av. du 21^{ème} Régiment d'Infanterie – BP 20042
52205 LANGRES
03 25 84 10 00

www.pays-langres.fr